

Administrative Einstellungen

Über die Schaltfläche **Einstellungen** wird die Anwendung von einem Benutzer mit Administratorrechten eingerichtet.

Registerkarte Prüfanlässe

Prüfanlass	Bezeichnung	Icon	Modul	Art	Typ	Barcode
Flaschen TÜV		Icon (29)	Atenschutz	Flaschen - At...		
Flaschenfüllen		Icon (29)	Atenschutz	Flaschen - At...	CFK 6,8 I / 3...	98765
Füllen med. Sauerstoff		Icon (35)	Medizintechnik	Flaschen - ...		
Imprägnieren		Icon (16)	Bekleidung	Schutzbeklei...		
Waschen		Icon (16)	Bekleidung	Schutzbeklei...		
Imprägnierung		Icon (16)	Bekleidung	Einsatzbekle...	FSK-Jacke, ...	
1/2 Jahresprüfung		Icon (30)	Atenschutz	Pressluftatm...		0815
Indienststellung		Icon (4)	Feuerlöscher	Fettbrandlös...	Fettbrandlös...	
Waschen FSK-Kleidung		Icon (16)	Bekleidung	Einsatzbekle...	FSK-Jacke, ...	

Hierüber werden die Prüfanlässe definiert, die in der Anwendung zur Verfügung stehen sollen.

Die Prüfanlässe können dann über Drag&Drop sortiert werden.

Mit den Schaltflächen **Neu**, **Öffnen** und **Löschen** werden die Prüfanlässe bearbeitet.

Prüfanlass
✕

Modul, Art, Typ* Feuerwehrrhalttegurt Typ A

Prüfanlass* Ausmusterung ▼

Sets nicht berücksichtigen
 Ausrüstungsgrund

Bei Sammelprüfung ausmustern
 ⚠
Verschrottung ▼

Bezeichnung

Bild* Icon (33) ▼

Barcode

Diesen Prüfanlass nicht an diesem Arbeitsplatz verwenden
 Füllung medizinischer Sauerstoff
 Füllung Atemluft mit Air Guard
 In App nur mit Recht "Flaschenfüllung"

✔ OK
⊘ Abbrechen

Modul, Art, Typ

Wählt den entsprechenden Eintrag aus der MAT-Hierarchie.

Prüfanlass

Nach dem die Einstellung der MAT-Hierarchie vorgenommen wurde, stehen in diesem Benutzermenü die Prüfanlässe der gewählten Ebene zur Verfügung.

Sets nicht berücksichtigen

Ist dieser Haken gesetzt, wird nur das gescannte Gerät, ohne evtl. vorhandene Setbestandteile, hinzugefügt.

Bei Sammelprüfung ausmustern

Ist dieser Haken gesetzt, werden alle gescannten Geräte bei dieser Sammelprüfung ausgemustert.

Der durchführende Benutzer muss das Recht **Ausmustern** besitzen.

Bezeichnung

Hier kann eine alternative Bezeichnung für den Prüfanlass eingegeben werden, falls mehrere

gleichlautende Prüfanlässe aus verschiedenen Modulen verwendet werden sollen.

Bild

Hierüber kann ein Bild für die Schaltfläche ausgewählt werden.

Barcode

Hier kann ein Barcode definiert werden, um die Anwendung vollständig über Barcodes zu bedienen.

Diesen Prüfanlass nicht an diesem Arbeitsplatz verwenden (ab Version 7000)

Über diese Option können einzelne Prüfanlässe für den aktuellen Arbeitsplatz ausgeblendet werden.

Füllung medizinischer Sauerstoff (nur Version 9000)

[Füllung medizinischer Sauerstoff \(nur Version 9000\)](#)

Füllung Atemluft mit Air Guard (ab Version 7000)

[Füllung Atemluft mit Air Guard](#)

In der App nur mit Recht "Flaschenfüllung"

Ist diese Option gesetzt, muss der durchführende Benutzer in der Drägerware.Mobile App zusätzlich das Recht Flaschenfüllung besitzen.

Registerkarte Arbeitplatzeinstellungen

DW Einstellungen
- □ ×

Prüfanlässe
Arbeitsplatzeinstellungen

Standortänderung

vor der Prüfung

nach der Prüfung *

▶ Hauptwache ▶ Bekleidungskammer ▶
🏠

Kostenstelle

Kostenstelle erbracht

📁 Speichern
⛔ Abbrechen

Standortänderung

vor der Prüfung (nur Version 9000)

Wird hier ein Wert eingestellt, werden alle Geräte automatisch vor der Prüfung auf diesen Standort gebucht.

nach der Prüfung

Wird hier ein Wert eingestellt, werden alle Geräte automatisch nach der Prüfung auf diesen Standort gebucht.

Kostenstelle erbracht (ab Version 7000)

Hier kann ein Vorgabewert für die Kostenstelle eingestellt werden.