

Anwendung

Standortänderung

Allgemeines

- Die Standortänderung ist im einfachen Modus (ohne Geräteaus/-rückgabe) als Webanwendung verfügbar.
- Für die Nutzung ist ein Login mit einem Benutzernamen der Drägerware erforderlich. Hierbei wird eine Gleichzeitigkeitslizenz der Drägerware belegt.
- Der Benutzer muss mindestens über das Rechte **Standortänderung** des jeweiligen Moduls verfügen.


Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/web** angehängen werden.

Beispiel:

http://localhost:8091/web

Nach dem Login kann über die Kachel **Drägerware - Standortänderung** die Anwendung ausgewählt werden.

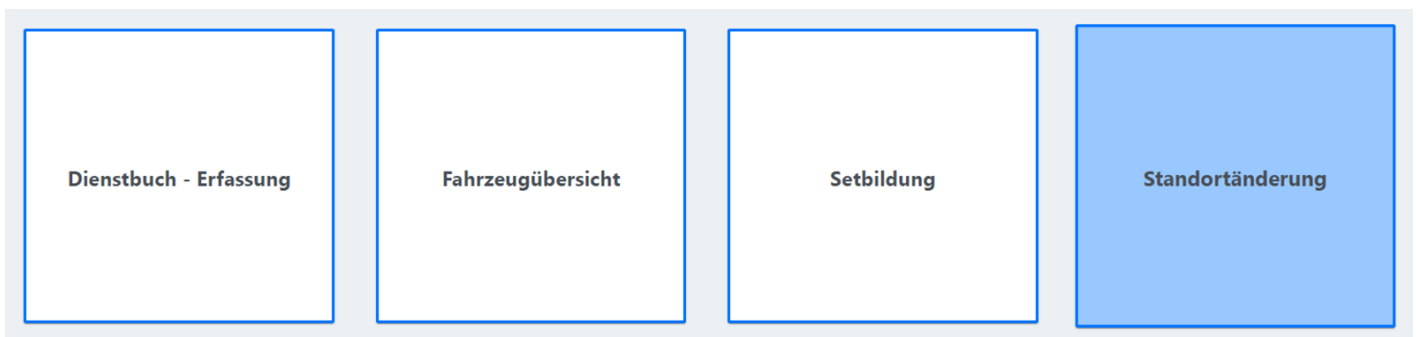

Zunächst muss der neue Standort ausgewählt werden:

Drägerware Web - Standortänderung

Neuen Standort scannen

Favoriten

BUCHEN

Alle Standorte

BKRZ

FRW-40

FRW-41

HALLE 11

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Vermisst

Dann werden die Geräte gescannt und über **Speichern** wird der Vorgang abgeschlossen.

Drägerware Web - Standortänderung

Geräte scannen

Neuer Standort: Station 1

Ausgewählte Geräte: 4

	Gerätetyp	Identifikation	Barcode	Standort	Menge		
	PSS 7000	PA-0011		Station 1, HLF-005			
	FPS 7000 P	MA-0033		Station 4, T, T-1, VL-0025, Weiße Kiste			
	CFK 6 l / 300 bar	CFK-0033		Station 1			
	PSS ESA LA	LA-0055		Vermisst			

Speichern

Abbrechen

Der Administrator kann in den Einstellungen

- einen festen (neuen) Standort vorgeben,
- die automatische Speicherung (nach jedem Scanvorgang) aktivieren und
- Favoriten (für Standorte) auswählen.

Meine Bestellungen

Standortänderung

☐ Festen Standort verwenden
 ☐ Automatische Speicherung

Favoriten

Standorte

BKRZ

FRW-40

FRW-41

HALLE 11

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Vermisst

Station 1

Station 2

Station

Station 1

Station 2

© Dräger Safety AG & Co. KGaA

Seite 2